

# 11-24. ME 機器の消毒方法・取り扱い (ME 機器管理センター)

## I. 概要

医療器具関連のアウトブレイクの原因として、病原体による環境表面の汚染がある。病原体の伝播を防止するために、ME 機器の使用後は清拭と消毒の感染予防策を講じることが重要である。

## II. ME 機器管理センターから貸し出している ME 機器の消毒方法

1. 使用後の ME 機器は各部署においてクリーンキーパー<sup>®</sup>で清拭する。
2. 病原体が検出された患者に使用した ME 機器は、ガウン、マスク、手指消毒、手袋の順で防護具を着用のうえ、各部署で ME 機器の消毒を実施し ME 機器管理センターに返却する。
3. 消毒方法はクリーンキーパー<sup>®</sup>で清拭してから、消毒用エタノール（アルコールワイプ）で消毒する。
4. 次亜塩素酸ナトリウム（ルビスタ<sup>®</sup>等）を使用している部署は消毒後 1 分間放置し、絞ったガーゼによる水拭きに加え、乾拭きを行う。
5. 下表に記載のある病原体が検出された患者に使用した ME 機器の消毒は指定の消毒液を用いる。
6. 多剤耐性アシネトバクター（MDRA）が検出された患者に使用した ME 機器の消毒については、ME 機器管理センター（内線 7002）に連絡する。

病原体名	指定の消毒液
クロストリジウム・ディフィシル (CD)	次亜塩素酸ナトリウム ※
ノロウイルス	次亜塩素酸ナトリウム ※
ロタウイルス	次亜塩素酸ナトリウム ※

※ 0.1%次亜塩素酸ナトリウム（ルビスタ<sup>®</sup>等）による消毒後は 1 分間放置し、絞ったガーゼによる水拭きに加え、乾拭きを行う。

## III. 病原体が検出された患者に使用した ME 機器を返却する基準及び注意点

1. 病原体が検出された患者に使用した ME 機器の返却基準は、患者退院時もしくは ME 機器の一連の使用が終了した時（同患者に退院まで使用しない時）とする。（ICU、HCU（初療室）、手術部、中央診療検査 I・II、医科・歯科外来は、部署内で ME 機器の消毒を実施する。）
2. 返却時の注意点は、各部署で ME 機器をビニール袋へ入れて「病原体名」を記載してから、ME 機器管理センターに返却する。

注：新型コロナウイルス（SARS-CoV2）については返却前に ME 機器管理センターに連絡し、橙色ビニール袋（感染性廃棄物）に入れて返却する。「コロナ」の記載はしない。

3. ME 機器管理センターで ME 機器の消毒と点検が終了するまでは、他の患者に続けて使用してはならない。

ME 機器管理センター

太田 稔

石川 勝清

寒河江 磨

松本 剛直

(R2.8 月作成)